

CE

Baby Control<sup>®</sup>



BC-2200 BC-2210 BC-2230

## CZ Návod k použití

Návod na použití digitálního monitoru dechu Baby Control:

- BC-2200 s jednou senzorovou podložkou
- BC-2210 se dvěma senzorovými podložkami
- BC-2230 se třemi senzorovými podložkami

## *Milá maminko, milý tatínku,*

*děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro monitor dechu Baby Control. Učinili jste tak krok k zajištění bezpečného a klidného spánku nejen pro Vaše dítě, ale i pro Vás samotné. Monitor dechu Baby Control zajistí nepřetržitou kontrolu nad dýcháním Vašeho dítěte po dobu strávenou v postýlce, kolébce, kočárku, zkrátka všude tam, kde jej používáte.*

*Doufáme, že budete s monitorem dechu Baby Control spokojení.*

## **Tým Baby Control.**



### **Proč je důležité, aby rodiče používali monitor dechu?**

Během prvního roku života jsou děti ohroženi tzv. Syndromem náhlého úmrtí kojence – SIDS (Sudden infant death syndrome), který se popisuje jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt jinak zdravého dítěte.

Děti do jednoho roku mají nepravidelné dýchání a může dojít dokonce i k zástavě dechu. Monitor dechu je jediný přístroj, který dokáže nepřetržitě sledovat charakteristické dýchací pohyby miminka během jeho pobytu v postýlce, kolébce, kočárku a včasným poplachem upozornit na případnou nebezpečnou situaci. Může tak pomoci zabránit zmiňovanému syndromu náhlého úmrtí kojence. Pokud rodič zástavu dechu včas rozpozná a dokáže vhodně zareagovat a dýchání dítěte obnovit, miminko se s velkou pravděpodobností zachrání. Používání monitoru dechu je nejúčinnějším způsobem k zabránění syndromu náhlého úmrtí kojenců. Monitor dechu Baby Control může zachránit život, ale není zařízením pro záchranu života.

## Popis funkcí monitoru dechu Baby Control

1. Monitor dechu Baby Control nepřetržitě sleduje dýchání dítěte ležícího v dětské postýlce, kolébce, kočárku, atd.
2. Senzorová podložka umístěná přímo na roštu pod matrací snímá dýchací pohyby dítěte, informace pak předává řídicí jednotce, která vyhodnocuje naměřené hodnoty.
3. Monitor dechu Baby Control detekuje případnou zástavu dechu. V případě nebezpečné situace, tj. v případě, že se hodnota dýchacích pohybů dítěte nachází déle než dvanáct vteřin pod nastavenou prahovou úrovní detekce (viz Nastavení prahové úrovně detekce), spustí Monitor dechu Baby Control hlasitý poplach.
4. Monitor dechu Baby Control však v žádném případě neumí do vzniklé nebezpečné situace zasáhnout. Umělé dýchání a ožívování může poskytnout pouze osoba, která absolvovala školení k tomu určené. Poproste o radu svého lékaře.



**DŮLEŽITÉ:** Během provozu pravidelně kontrolujte funkčnost monitoru dechu Baby Control! V případě poruchy se okamžitě obraťte na distributora.

# Vlastnosti monitoru dechu Baby Control

## 1. Detekce se provádí přes matraci

Monitor dechu Baby Control není v bezprostředním kontaktu s miminkem. Jeho používání neovlivňuje životní podmínky miminka a rodiny. Je nenápadný a používá se velmi jednoduše.

## 2. Jediněně velká monitorovací plocha

Rozměr jedné senzorové podložky je 300 x 500 mm. Monitory dechu Baby Control disponují v závislosti na typu jednou, dvěma, třemi až čtyřmi (typ pro dvojčata) senzorovými podložkami. Monitor dechu Baby Control se třemi senzorovými podložkami je schopen sledovat povrch většiny dětských postýlek. Obavy z přesunutí se miminka mimo snímací plochu je možné snížit použitím typu s více senzorovými podložkami.

## 3. Variabilní umístění senzorových podložek

Senzorovou podložku můžete umístit i na dočasném lůžku miminka, ke kterému stačí přenést jen řídicí jednotku.

## 4. Vynikající citlivost v bočním směru

V případě, že miminko neleží přesně na senzorové podložce, detekuje monitor dechu Baby Control i dýchací pohyby přicházející z boční strany, proto ani v tomto případě není nutné obávat se nedostatečného snímání.

## 5. Možnost použití ke každému typu matrace a roštu

Senzorová podložka monitoru dechu Baby Control se umísťuje přímo na rošt postýlky a je možné bezpečně ji použít ke všem matracím bez omezení materiálu a tloušťky.

## 6. Digitálně nastavitelná prahová úroveň detekce

Několika stisky tlačítka je možné nastavit prahovou úroveň detekce dýchacích pohybů dítěte, která nejvíce odpovídá prostředí.

## 7. Digitální zobrazení intenzity dýchacích pohybů

Na displeji, dobře viditelném i ve tmě (svítící), je možné sledovat intenzitu dýchacích pohybů miminka na stupnici 0-9.

Tak je možné jediným pohledem zjistit, zda je monitor dechu Baby Control vhodně nastaven pro dýchání miminka.

## 8. Monitor dechu Baby Control umí přehrát události posledních devíti minut v jedninutových krocích

V reálném čase přehraje jím zaznamenané události z digitální paměti, což může poskytnout důležité informace o okolnostech případného zastavení dýchání.

## 9. Dvojitá (bezpečnostní) sířena

Monitor dechu Baby Control je vybaven dvojitou bezpečnostní sířenou.

## 10. Sledování napětí baterie

V případě nízkého napětí baterie upozorní monitor dechu Baby Control při zapnutí na výměnu baterie.

## 11. Záruční doba

Záruční doba je po dobu 2 let od zakoupení výrobku koncovým uživatelem.

Záruka 5 let na funkčnost řídicí jednotky.

## Příslušenství zařízení monitoru dechu Baby Control

### Balení monitoru dechu Baby Control Digital BC-2200 obsahuje:

1 ks - BC-2000 řídicí jednotka

1 ks - BC-2101 senzorová podložka obalená plastickým povrchem

2 ks - AA alkalické baterie

1 ks - Návod na použití

*Monitor dechu Baby Control BC-2200 bez výjimky ovládá veškeré funkce, které charakterizují produktovou řadu Baby Control, a to digitální zobrazení intenzity pohybu, paměť událostí, digitálně nastavitelná prahová úroveň detekce, dvojitá bezpečnostní sířena, sledování napětí baterie, atd. Součástí balení je senzorová podložka velkých rozměrů, která v menších dětských postelích poskytuje dostatečnou a bezpečnou detekci dýchacích pohybů. Díky vysoké citlivosti senzorové podložky na bočních stranách je monitor dechu Baby Control schopen sledovat větší plochu, než je skutečný rozměr podložky. V případě potřeby je možné rozšířeni i o dvě senzorové podložky navíc (senzorová podložka navíc není součástí balení). Výhodou tohoto typu monitoru dechu je příznivá cena.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!