

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Trace Pro, Keychain, S80 Pro

BACtrack C8, C6 Keychain



SPECIFICKÉ ÚČINKY DÁVEK ALKOHOLU*)

| BAC [%] | Specifické účinky |
|-----------|--|
| 0,02-0,03 | Mírná euforie. Ztráta plachosti. Tlumící účinky nejsou zřejmé. Zhoršení je možné u některých jedinců. |
| 0,04-0,06 | Pocit pohody, relaxace, nižší zábrany a pocit tepla. Euforie. Někdy menší porucha uvažování a paměti. Snížení opatrnosti. Při této úrovni intoxikace může být snížena schopnost řídit. |
| 0,07-0,09 | Mírné narušení rovnováhy, řeči, vidění, reakční doby a sluchu. Euforie. Soudnost a sebeovládání jsou omezeny. Pozornost, reakce a paměť jsou narušeny. Řidičské dovednosti jsou vždy zhoršeny při této a vyšší úrovni intoxikace. |
| 0,10-0,12 | Významné narušení motorické koordinace a ztráta dobrého úsudku. Řeč může být nesrozumitelná. Rovnováha, vidění, reakční doba a sluch budou narušeny. Euforie. |
| 0,13-0,15 | Hrubé poškození pohyblivosti a nedostatek fyzické kontroly. Rozmazané vidění a velká ztráta rovnováhy. Euforie se zmenšuje a začíná se objevovat dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání). |

| BAC [%] | Specifické účinky |
|-------------|--|
| 0,16-0,20 | Převládá dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání). Může se objevit nevolnost. |
| 0,25 | Nutná pomoc při chůzi. Celkový duševní zmatek. Dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání) s nevolností a zvracením. |
| 0,30 | Ztráta vědomí. |
| 0,40 a více | Nástup komatu. Možná smrt kvůli zastavení dýchání. **) |

BAC = Blood Alcohol Content (Obsah alkoholu v krvi).
Přístroj zobrazuje výsledky měření v % BAC, hodnoty v promile jsou desetkrát větší (např. 0,13 % BAC = 1,3 ‰).

*) Účinky intoxikace alkoholem jsou výrazně ovlivněny individuálními rozdíly mezi uživateli. Někteří uživatelé budou pod vlivem alkoholu mnohem dříve, než je uvedeno výše.

**) Smrt může nastat i při nižším množství alkoholu v krvi, je to velmi individuální.

Vaše řidičské schopnosti mohou být narušeny na libovolné úrovni nad 0,00 %BAC (tzn. 0,00 ‰). Nikdy není bezpečné vypít jakékoliv množství alkoholu a řídit.

Důležité!

Testované osoby by měly počkat 20 minut po jídle, pití nebo kouření, než začnou foukat do BACtrack testeru. Nepodaří-li se počkat 20 minut, může dojít k nepřesným výsledkům testů a poškození čidla.

BACtrack Trace Pro, Keychain, S80 Pro


PŘÍPRAVA

Instalace baterií

Vložte baterie příslušného typu do bateriového prostoru.

POPIS PRODUKTU

Čelní pohled

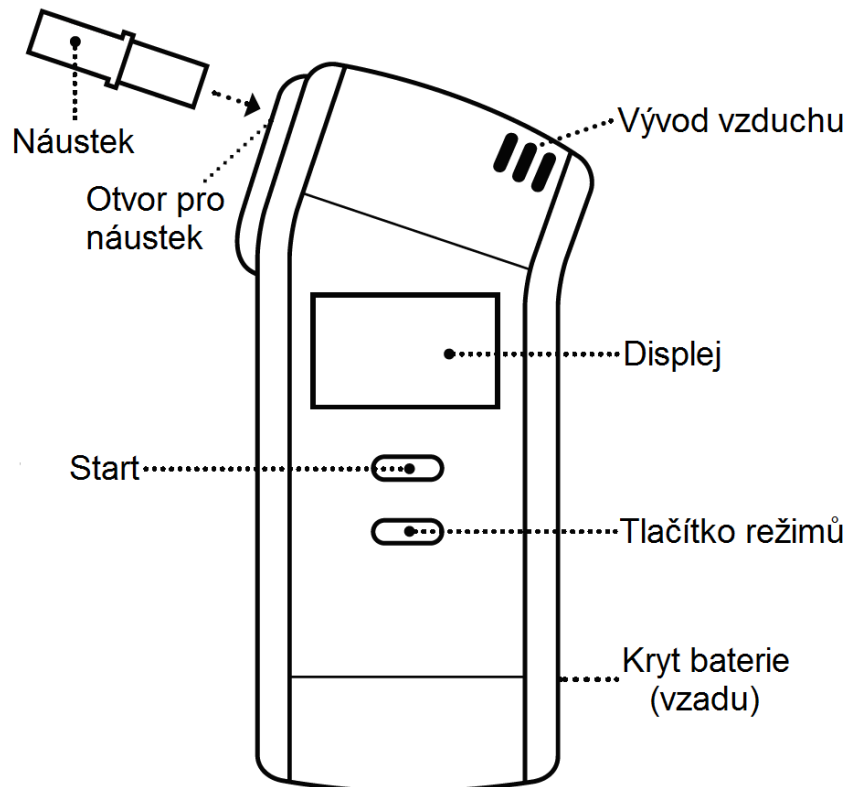


OBSLUHA



Krok č. 1: Zasuňte náustek do otvoru. Nepoužívejte násilí, náustek zasuňte pouze několik milimetrů.



Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **START**. Tester rychle zobrazí celkový počet provedených testů a zahájí odpočet.

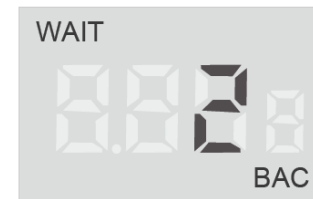

Krok č. 3: Když se odpočítávání blíží číslu 2, začněte se zhluboka nadechovat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!