

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Trace Pro, Keychain, S80 Pro

**BAC**track C8, C6 Keychain



# SPECIFICKÉ ÚČINKY DÁVEK ALKOHOLU\*)

BAC [%]	Specifické účinky
0,02-0,03	Mírná euforie. Ztráta plachosti. Tlumící účinky nejsou zřejmé. Zhoršení je možné u některých jedinců.
0,04-0,06	Pocit pohody, relaxace, nižší zábrany a pocit tepla. Euforie. Někdy menší porucha uvažování a paměti. <b>Snížení opatrnosti. Při této úrovni intoxikace může být snížena schopnost řídit.</b>
0,07-0,09	Mírné narušení rovnováhy, řeči, vidění, reakční doby a sluchu. Euforie. Soudnost a sebeovládání jsou omezeny. Pozornost, reakce a paměť jsou narušeny. <b>Řidičské dovednosti jsou vždy zhoršeny při této a vyšší úrovni intoxikace.</b>
0,10-0,12	Významné narušení motorické koordinace a ztráta dobrého úsudku. Řeč může být nesrozumitelná. Rovnováha, vidění, reakční doba a sluch budou narušeny. Euforie.
0,13-0,15	Hrubé poškození pohyblivosti a nedostatek fyzické kontroly. Rozmazané vidění a velká ztráta rovnováhy. Euforie se zmenšuje a začíná se objevovat dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání).

BAC [%]	Specifické účinky
0,16-0,20	Převládá dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání). Může se objevit nevolnost.
0,25	Nutná pomoc při chůzi. Celkový duševní zmatek. Dysforie (stavy úzkosti a depresivního prožívání) s nevolností a zvracením.
0,30	Ztráta vědomí.
0,40 a více	Nástup komatu. Možná smrt kvůli zastavení dýchání. **)

**BAC** = Blood Alcohol Content (Obsah alkoholu v krvi).  
Přístroj zobrazuje výsledky měření v % BAC, hodnoty v promile jsou desetkrát větší (např. 0,13 % BAC = 1,3 ‰).

\*) Účinky intoxikace alkoholem jsou výrazně ovlivněny individuálními rozdíly mezi uživateli. Někteří uživatelé budou pod vlivem alkoholu mnohem dříve, než je uvedeno výše.

\*\*) Smrt může nastat i při nižším množství alkoholu v krvi, je to velmi individuální.

Vaše řidičské schopnosti mohou být narušeny na libovolné úrovni nad 0,00 %BAC (tzn. 0,00 ‰). Nikdy není bezpečné vypít jakékoliv množství alkoholu a řídit.

## Důležité!

Testované osoby by měly počkat 20 minut po jídle, pití nebo kouření, než začnou foukat do BACtrack testeru. Nepodaří-li se počkat 20 minut, může dojít k nepřesným výsledkům testů a poškození čidla.

# BACtrack Trace Pro, Keychain, S80 Pro


## PŘÍPRAVA

### Instalace baterií

Vložte baterie příslušného typu do bateriového prostoru.

## POPIS PRODUKTU


### Čelní pohled

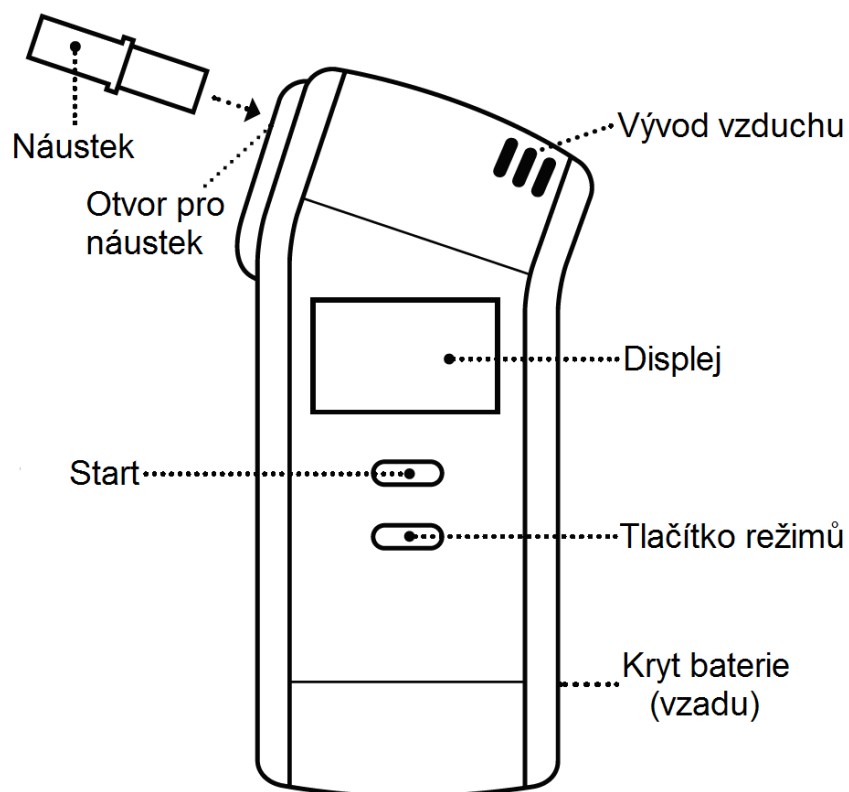


## OBSLUHA



**Krok č. 1:** Zasuňte náustek do otvoru. Nepoužívejte násilí, náustek zasuňte pouze několik milimetrů.

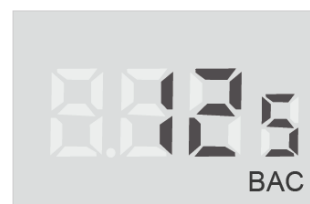

**Krok č. 2:** Stiskněte tlačítko **START**. Tester rychle zobrazí celkový počet provedených testů a zahájí odpočet.

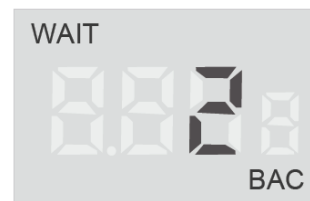

**Krok č. 3:** Když se odpočítávání blíží číslu 2, začněte se zhluboka nadechovat.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!