

**SENCOR®**

Let's live!

## **SCA BA50FC**

**Profesionální alkohol tester**

**NÁVOD K OBSLUZE**



# OBSAH

1. Důležité bezpečnostní pokyny .....	3
2. Měření .....	3
3. Nabíjení baterie/Zdroj energie.....	4
4. Popis.....	5
5. Ovládání .....	6
Zapnutí a vypnutí napájení.....	6
Spuštění testování alkoholu v dechu .....	6
Důležité poznámky .....	7
6. Kalibrace.....	8
7. Uživatelský reset zařízení.....	9
8. Technické údaje .....	10

# 1. Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete celý návod k použití, seznamte se s důležitými bezpečnostními opatřeními a detailními instrukcemi k používání přístroje. Návod k použití uložte na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. V případě prodeje přístroje nepamenejte návod předat novému majiteli společně s přístrojem a jeho příslušenstvím.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!!!**

**Použití analyzátoru alkoholu v dechu bezprostředně nebo do 15 minut po použití alkoholického nápoje může vést k poškození detekční sondy a hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto vyjmut z záručních podmínek pro neodborné zacházení.**

**Přístroj doporučujeme skladovat a používat při pokojové teplotě. Používání a skladování při jiných teplotách může ovlivnit přesnost měření.**

Testování neprovádějte v silném větru, nebo v uzavřené místnosti, která je silně zakouřena, nebo obsahuje alkoholové výparu.

- Pokud se na displeji objeví symbol vybité baterie, přístroj dobijte.
- Do náustku nevděchujte kouř, jídlo, nebo tekutiny.
- Používání v prostředí mimo stanovené meze může vést k poškození přístroje a nepřesným výsledkům testování.
- Úroveň alkoholu v dechu závisí na mnoha faktorech a v čase se mění. Úroveň se tedy může měnit již několik minut po původním měření.
- Výsledky měření tohoto přístroje nelze použít v soudním procesu jako důkazní materiál.
- Údaje z tohoto přístroje jsou pouze informativní. Doporučujeme jej nepoužívat pro rozhodování o schopnosti provádět jakoukoliv zodpovědnou činnost. Několik faktorů (např. zbytky přírodního plynu, kouř nebo nežádoucí dech) mohou ovlivnit výši naměřené hodnoty.
- Nedovolte sobě, ani nikomu jinému, aby po požití alkoholu řídil vozidlo. Vždy si opatřete náhradního řidiče, nebo použijte alternativní dopravní prostředek, pokud jste požili alkohol.
- Prodejce ani výrobce není odpovědný za vzniklé škody použitím tohoto přístroje.

**NIKDY NEPIJTE ALKOHOL, POKUD SE CHYSTÁTE ŘÍDIT MOTOROVE VOZIDLO!!!**

## 2. Měření

- Osobní alkohol tester SCA BA50FC je ruční profesionální analyzátor alkoholu. Elektrochemický (fuel cell) snímač s palivovým článkem využívá elektrochemickou reakci platiny s molekulami etanolu a proto představuje osobní alkohol tester SCA BA50FC stabilní a spolehlivou technologii měření.
- Zdržte se po dobu alespoň 15 minut kouření a pití alkoholu před měřením.
- Před použitím si umyjte ústa vodou.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!