

Přístroj pro monitorování tělesné stavby lidského těla VIVA (HBF-222T-EBK)

• Návod k obsluze

CZ

Výrobce 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Výrobní závod	Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd. No.28, Xinyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou Jiangsu 225009, Čína
Pobočky	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NĚMECKO www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE www.omron-healthcare.com	
Distribuce a servis pro ČR	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

Děkujeme vám za nákup přístroje pro monitorování tělesné stavby lidského těla OMRON.

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, abyste rozuměli zásadám bezpečného a správného použití.

Tento návod k obsluze ponechte na vhodném místě, abyste do něj mohli později nahlížet.

Děkujeme vám za nákup tohoto přístroje pro monitorování tělesné stavby lidského těla OMRON. Tento přístroj slouží k měření a zobrazování následujících parametrů složení těla.

- Tělesná hmotnost
- Viscerální tuk (až 30 hladin)
- Bazální metabolismus (v kcal)
- Tělesný tuk (v %)
- Kosterní svalstvo (v %)
- BMI (index tělesné hmoty)

Tento přístroj je určen k provozu **dospělými**, kteří rozumí tomuto návodu k obsluze. Není určen pro profesionální používání v nemocnicích nebo jiných lékařských zařízeních. Slouží výhradně k domácímu použití.






Před použitím a pro získání dalších informací o jednotlivých funkcích si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Obsah

Před použitím přístroje	2
Důležité bezpečnostní pokyny.....	2
1. Popis přístroje	4
2. Vložení a výměna baterií	5
3. Spárování přístroje s Vaším chytrým zařízením	6
4. Nastavení jednotky měření, data a času	7
5. Registrace osobních údajů	8
Návod k obsluze	9
6. Přesná měření	9
6.1 Správné držení těla během měření.....	9
6.2 O funkci „0 kg korekce“ (upozornění pro skladování)	10
6.3 Použití funkce „0 kg korekce“.....	10
7. Měření	10
Použití paměti	12
8. Prohlížení výsledků měření na vašem chytrém zařízení	12
V případě potřeby	13
9. Výběr svého osobního čísla a provedení měření.....	13
10. Režim hosta (režim bez záznamu)	14
11. Vážení bez měření tělesného tuku	15
12. Změna nebo vymazání vašich osobních údajů	16
13. Vymazání nastavení komunikace.....	17
14. Údržba a skladování	17
15. Řešení problémů	18
16. Technické údaje	21
Informace o složení těla.....	24
17. Informace o složení těla.....	24
18. Diagramy interpretace výsledků měření	26

Důležité bezpečnostní pokyny

Symbody a definice jsou následující:

 Pozor:	Nesprávné použití by vás mohlo ohrozit a mít za následek úmrtí nebo vážné zranění.
 Varování:	Nesprávné použití může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 Upozornění:	Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Pozor:

- Nikdy nepoužívejte tento přístroj v kombinaci s lékařskými elektronickými zařízeními, jako jsou:
 - (1) lékařské elektronické implantáty, například stimulatory;
 - (2) elektronické podpůrné systémy životních funkcí, např. umělé srdce/plíce;
 - (3) přenosná elektronická lékařská zařízení jako např. elektrokardiograf.Tento přístroj může způsobit selhání funkce těchto zařízení a tím představuje závažné zdravotní riziko pro uživatele těchto zařízení.



Varování:

- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Obsahuje malé části, které mohou po polknutí dětmi způsobit jejich udušení.
- Nepoužívejte přístroj na kluzkém povrchu, například na vlhké podlaze.
- Neskákejte na přístroj ani na něm neposkakujte.
- Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré tělo nebo nohy, například po koupeli.
- Na přístroj se postavte bosýma nohama. Pokud se na přístroj postavíte v ponožkách, můžete uklouznout a poranit se.
- Nestoupejte na okraj přístroje nebo na oblast displeje.
- Tělesné postižení nebo lidé fyzicky slabí by měli tento přístroj používat vždy za asistence jiné osoby.
- Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, ihned je vypláchněte velkým množstvím čisté vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte tento produkt v nemocnicích, v letadlech nebo v jiném prostředí, kde je omezeno použití rádiových vln.
- Tento produkt vydává radiofrekvenční (RF) záření v pásmu 2,4 GHz. Nepoužívejte tento produkt na místech s RF omezeními, jakými jsou např. letadla nebo nemocnice.

Upozornění:

- Přístroj nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepokoušejte se o hubnutí ani nezačínajte s cvičením, dokud si nepromluvíte se svým lékařem nebo zdravotníkem. Pokud se budete snažit určit si diagnózu sami, můžete poškodit své zdraví.
- Během měření se ujistěte, že se do 30 cm od tohoto zařízení nenachází žádný mobilní telefon ani jiná elektrická zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole. Může to vést k chybám při provozu zařízení a/nebo k nesprávnému měření.
- Používejte baterie určené pro tento přístroj. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (viz údaj na zadní části přístroje).
- Staré baterie ihned vyměňte za nové.
- Baterie nevhazujte do ohně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!