

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER HELMER ALKOSURE



MANUÁL

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM
PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

DON'T DRINK AND DRIVE!

Helmer Alkosure je v současné době nejmenší digitální alkohol tester na světě. Toto malé zařízení pomáhá změřit obsah alkoholu v krvi během několika vteřin. Jedná se o přesné, a extrémně praktické zařízení, které můžete nosit neustále při sobě, např. jako klíčenku.



Začínáme

V testeru je již vložena baterie CR2032. Abyste mohli jednotku používat, je nutné prstem směrem dolů odsunout dvířka na zadní straně a vyjmout folii, která brání kontaktu baterie a přístroje. Zavřete dvířka a tester je již připraven k použití!

Před testováním počkejte 15 minut

IMPORTANT!

Wait 20 Minutes



No Drinking



No Smoking



Před měřením počkejte 15 minut od poslední konzumace alkoholu. Nedodržení této min. doby může vést k nepřesným a zkresleným výsledkům.

Před měřením doporučujeme min. 15 minut nekouřit, nepít a vypláchnout si ústa vodou. Pokud provedete měření těsně po konzumaci alkoholu, přístroj zpočátku vykáže vysoké hodnoty z důvodu zbytku alkoholu ve Vašich ústech. Tyto hodnoty budou postupně klesat.

**V některých případech může přístroj zobrazit výsledek: „Out“. K tomuto dochází v momentech, kdy byl test proveden buď v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí. Umístěte prosím tester do prostředí s normální pokojovou teplotou. Pravděpodobně budete muset počkat několik minut, než se senzor uvnitř testeru stabilizuje na pokojovou teplotu, a bude možné provést nový test.*

V případě, že se neozve během měření táhlé pípnutí, ale až 2x krátké a po-té 0,00, znamená to, že přístroj nedetekoval žádný alkohol, nicméně detekoval jinou dávku v dechu (typicky zápach z úst).

*** Tester se automaticky vypne po 30ti vteřinách nečinnosti. Tester rovněž můžete vypnout stisknutím tlačítka „POWER“.*

Doporučený čas mezi měřeními

Mezi jednotlivými testy se doporučuje počkat 3-5 minut. V případech vysoké koncentrace alkoholu se doporučuje počkat až 10 minut před provedením dalšího testu. Je to čas nezbytný k samovyčištění zbytků alkoholu, zbylých na senzoru. Pomáhá rovněž udržet stav senzoru v dobré kondici a zabezpečí konzistenci výsledků testů.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!