



Automatický měřič krevního tlaku na paži + EKG Complete (HEM-7530T-E3) Návod k obsluze



CZ

OMRON

<https://www.omron-healthcare.com/>

 <p>Výrobce</p>	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunitsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO</p>
<p> Zástupce pro EU</p>	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hooftdorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com</p>
<p>Dovozce do EU</p>	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Matsusaka Factory 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi, Mie, 515-8503 Japonsko</p>
<p>Výrobní závod</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com</p>
<p>Pobočka</p>	<p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>
<p>Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK</p>	<p>CELMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz</p>
<p>Pobočky</p>	<p>CELMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz</p>
<p>Distribuce a servis pro ČR a metrologické ověření pro lékařské zařízení</p>	<p>CELMED®</p>

16. Doporučení a prohlášení výrobce

Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)

HEM-7530T-E3 odpovídá normě EN60601-1-2:2015 elektromagnetické kompatibility (EMC).

Další dokumentace dle této normy EMC je k dispozici na adrese www.omron-healthcare.com. Informace o EMC pro HEM-7530T-E3 najdete na webových stránkách.

CELMED

CELMED

16. Doporučení a prohlášení výrobce

Popis symbolů			Značka kontroly kvality výrobce
	Technologie společnosti OMRON s ochrannou známkou pro měření krevního tlaku	QUALITY PASS ,	
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením	LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku		Obvod paže CELMED
	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.		Uživatel si musí prostudovat tento návod k obsluze.
	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu		Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti.
	Stejnoseměrný proud		K indikaci obecně zvýšených, potenciálně nebezpečných úrovní neionizujícího záření, nebo k indikaci zařízení či systémů, např. v oblasti zdravotnických elektrických zařízení, která obsahují radiofrekvenční vysílače nebo která záměrně používají radiofrekvenční elektromagnetickou energii k diagnostice nebo léčbě.
	Baterie		Datum výroby
	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.		

CZ60

Obsah

Úvod	CZ2
Bezpečnostní pokyny	CZ2
Účel použití	CZ3
Příjem a kontrola	CZ3
Důležité bezpečnostní informace	CZ4
1. Seznámení s měřičem	CZ10
1.1 Obsah	CZ10
1.2 Měřič a manžeta	CZ10
1.3 Zobrazení naměřených hodnot KT a symboly na měřiči	CZ11
1.4 Pokyny pro léčbu arteriální hypertenze ESH/ESC* z roku 2018	CZ13
1.5 Výsledek záznamu Vašeho EKG	CZ14
1.6 Rozdíl mezi tepovou frekvencí a srdeční frekvencí	CZ18
2. Příprava	CZ19
2.1 Instalace baterií	CZ19
2.2 Párování měřiče s chytrým telefonem	CZ21
2.3 Tipy pro měření krevního tlaku / záznamy EKG	CZ23
3. Měření krevního tlaku a záznam EKG	CZ24
3.1 Nasazení manžety	CZ24
3.2 Správné sezení	CZ26
3.3 Měření krevního tlaku a záznam EKG	CZ27
4. Pouze měření krevního tlaku	CZ33
5. Pouze záznam EKG	CZ36
6. Ruční přenos naměřených hodnot krevního tlaku. CZ39	
7. Měření krevního tlaku ručně	CZ40

8. Další nastavení měřiče	CZ41
8.1 Vypnutí/zapnutí funkce Bluetooth	CZ41
8.2 Obnova měřiče do výchozího nastavení	CZ42
9. Prohlížení paměti v aplikaci	CZ43
9.1 Prohlížení Vašich záznamů EKG	CZ43
9.2 Prohlížení naměřených hodnot krevního tlaku	CZ43
10. Nastavení EKG a úpravy v aplikaci	CZ44
10.1 Úpravy přehledu záznamů	CZ44
10.2 Upravitelná nastavení	CZ44
11. Chybová hlášení a řešení problémů	CZ45
12. Údržba	CZ51
12.1 Údržba	CZ51
12.2 Skladování	CZ51
12.3 Čištění	CZ53
12.4 Kalibrace a servis	CZ53
13. Volitelné příslušenství	CZ54
14. Technické údaje	CZ55
15. Limitovaná záruka	CZ58
16. Doporučení a prohlášení výrobce	CZ59

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!