

## SK ČISTENIE MANŽETY

Nečistoty z manžety odstráňte kúskom textílie navlhčenou v mydlovej vode. **Návlek manžety** je možné ručne prať po vybratí vzduchového vaku z manžety.

**Otvor na okraji návleku manžety nie je chyba. Služí na vybratie vzduchového vaku pred praním návleku.**

## ZLOŽENIE MANŽETY

Manžeta Microlife sa skladá z **návleku manžety** (textilná časť manžety, ktorá sa ovíja okolo končatiny), vzduchového vaku (vzdušnica – slúži na nafúknutie), hadičky a konektora (na pripojenie manžety k tlakomeru).

## POSTUP

1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrne vyberte vzduchový vak.
3. Návlek manžety je možné ručne prať vo vode s teplotou max. 30 °C.

### Vzduchový vak NIKDY NEPERTE!

Návlek manžety nechajte dôkladne vysušiť.

4. Do opraného návleku opatrne vložte späť vzduchový vak. Hadičku prevlečte cez otvor pre hadičku zvnútra manžety von.
5. Vzduchový vak musí byť v manžete dokonale vystretý. Môžete si pomôcť vhodným tupým predmetom.
6. Znova pripojte konektor manžety.

## ⚠ Upozornenia

- Vzduchový vak musí byť v návleku manžety vyrovnaný, nie preložený alebo pokrčený.
- Na pranie nepoužívajte zmäkčovadlá tkanín.
- Vždy pred praním vyberte vzduchový vak z manžety.
- Po vypraní návleku vložte vzduchový vak naspäť do návleku.
- **NIKDY NEPERTE vnútorný vzduchový vak!**
- **Manžetu ani samotný návlek manžety neperte v práčke alebo umývačke riadu!**

## Záruka

Záručná doba na tesnosť vzduchového vaku manžety je **2 roky**. Záruka sa nevzťahuje na snímateľný návlek a opotrebovanie manžety spôsobené bežným používaním podľa návodu.

## CZ ČISTĚNÍ MANŽETY

Nečistoty z manžety odstráňte kouskem textílie navlhčenou v mýdlovej vode. **Návlek manžety** je možné prať v ruce po vyjmutí vzduchového vaku z manžety.

**Otvor na okraji návleku manžety není chyba. Slouží k vyjmutí vzduchového vaku před praním návleku.**

## SLOŽENÍ MANŽETY

Manžeta Microlife se skládá z **návleku manžety** (textilní část manžety, která se ovíjí kolem paže), vzduchového vaku (vzdušnice – slouží k nafouknutí), hadičky a konektoru (k připojení manžety k tlakoměru).

## POSTUP

1. Od hadičky odpojte konektor.
2. Z návleku opatrně vyjměte vzduchový vak.
3. Návlek manžety lze prať ručně ve vodě s teplotou max. 30 °C.

### Vzduchový vak NIKDY NEPERTE!

Návlek manžety nechte po oprání důkladně vysušiť.

4. Do vypraného návleku opatrně vložte zpět vzduchový vak. Hadičku protáhněte otvorem pro hadičku zevnitř manžety ven.
5. Vzduchový vak musí být v manžetě dokonale narovnaný. Můžete si pomoci vhodným tupým předmětem.
6. Znova připojte konektor manžety.

## ⚠ Upozornění

- Vzduchový vak musí být v návleku manžety vyrovnaný, ne přeložený nebo pomačkaný.
- Na prání nepoužívejte změkčovadla tkanin.
- Vždy před praním vyjměte vzduchový vak z manžety.
- Po vyprání a dokonalém vysušení návleku vložte vzduchový vak zpět do návleku.
- **NIKDY NEPERTE vnitřní vzduchový vak!**
- **Manžetu ani samotný návlek manžety neperte v práčke nebo myčce nádobí!**

## Záruka

Záruční doba na těsnost vzduchového vaku manžety je **2 roky**. Záruka se nevzťahuje na snímateľný návlek a/nebo opotrebovanie manžety spôsobené bežným používaním dle návodu.

## Otvor na okraji manžety



## POSTUP

