

BRAUN

iCheck® 7



BPW 4500

Braun iCheck® 7

BPW 4500

Měřič krevního tlaku na zápěstí

CZ	Česky	2
DE	Deutsch.	12
ES	Español.	22
FR	Français	32
IT	Italiano	42
NL	Nederlands	52
PT	Português.	62

Popis výrobku



www.hot-europe.com

Tento produkt je vyroben v licenci pro značku 'Braun'. 'Braun' je registrovaná ochranná známka společnosti Braun GmbH, Kronberg, Německo.

Slovní označení a logo The Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek podléhá licenci.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

iCheck® je registrovaná ochranná známka společnosti Helen of Troy Limited.



Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Switzerland



© 2017, všechna práva vyhrazena

BPW4500WE P/N A000510R0 25AUG17

Zamýšlené použití Braun iCheck® 7

Braun iCheck® 7 je měřič krevního tlaku, který byl vyvinut pro rychlé a přesné měření krevního tlaku ze zápěstí. Tento měřič krevního tlaku působí jako samostatné zařízení a automaticky zaznamenává vaše poslední hodnoty. Zaznamenané údaje lze později stáhnout do Smartphonu pro interpretaci pokročilých trendů.

Co byste měli vědět o krevním tlaku

Krevní tlak se mění po celý den. Prudce stoupá v časných ranních hodinách a klesá během pozdního dopoledne. Krevní tlak stoupá opět v odpoledních hodinách a nakonec poklesne na nízkou úroveň v noci. Může taky kolísat během krátkého období. Proto se hodnoty z několika měření mohou lišit.

Toto zařízení zobrazí hodnotu vašeho krevního tlaku ve dvou hodnotách: systolické a diastolické. Systolický krevní tlak (vyšší číslo) určuje, jak velký tlak krev vyvíjí na cévní stěnu při tlukotu srdce. Diastolický tlak (nižší číslo) udává, jak velký tlak krev vyvíjí proti cévní stěně, zatímco srdce odpočívá mezi údery. Po každém měření se zobrazí i hodnota pulsu.

ESH (Evropská společnost pro hypertenzi) a WHO (Světová zdravotnická organizace) nastavily následující standardní hodnoty krevního tlaku, hodnoty při měření pulsu v klidovém režimu doma:

Krevní tlak (mmHg)	Příliš nízký	Normální hodnoty	Stupeň 1 mírná hypertenze	Stupeň 2 střední hypertenze	Stupeň 3 těžká hypertenze
SYS = systola (vyšší hodnota)	pod 100	až 134	135-159	160-179	≥180
DIA = diastola (nižší hodnota)	pod 60	až 84	85-99	100-109	≥110

Pro každé měření zobrazené na obrazovce určí přiřazená barva (od zelené k červené) příslušnou úroveň krevního tlaku. Tato klasifikace vám každodenně pomůže určit váš krevní tlak. Pokud vás tato klasifikace znepokojuje, měli byste se co nejdříve poradit se svým lékařem.

Chcete-li zajistit přesné výsledky měření, pozorně si přečtěte celý návod k použití.

	SYS (mmHg)		DIA (mmHg)
Zelená >	< 135	a	< 85
Žlutá >	135-159	nebo	85-99
Oranžová >	160-179	nebo	100-109
Červená >	180+	nebo	110+

Bezpečnostní informace a důležitá upozornění

Lidé trpící srdeční arytmií, zúžením cév, kornatěním cév v končetinách, diabetem nebo uživateli kardiostimulátorů by se měli poradit se svým lékařem před samotným měřením krevního tlaku. K odchylkám v hodnotách krevního tlaku může dojít v těchto případech.

Pokud jste v procesu léčby nebo užíváte léky, poraďte se nejdříve s lékařem.

Použití tohoto měřiče krevního tlaku nenahrazuje návštěvu lékaře.

Klíčová pravidla pro přesné měření krevního tlaku

Vždy měřte ve stejnou denní dobu, za stejných podmínek.

Měřič používejte nejdříve po uplynutí 30 minut od kouření, pití kávy nebo čaje nebo jakékoli námaze. Tyto faktory ovlivní měření.






Měříme vždy na stejném zápěstí. Doporučujeme používat levé zápěstí.

Před osazením měřiče si sundejte hodinky a šperky z ruky, na které budete měřit.

Odstraňte těsné oblečení z vaší ruky.

Pokud chcete provést více měření, počkejte přibližně 3 minuty před opakováním měření.

Popis výrobku (viz Strana 1)

-  Tlačítko zapnuto/vypnuto (také pro Bluetooth® párování, viz strana 7)
-  Grafický displej pro měření a označení
-  Okamžité čtení indikátoru
-  Kryt prostoru pro baterie
-  Manžeta

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!