

Babysense™ 1 Pro

Bezdotykový dětský monitor dechu

Bezdotykový detský monitor dychu

Érintkezés nélküli légzésfigyelő eszköz babáknak

Nyní se zvýšenou citlivostí

Teraz so zvýšenou citlivosťou

Most még nagyobb érzékenységgel

Uživatelská příručka
Návod na používanie
Használati útmutató



Babysense™ 1 Pro

Bezdotykový dětský monitor dechu
Nyní se zvýšenou citlivostí

Upozornění

Před instalací a používáním výrobku si důkladně prostudujte tuto příručku.

Babysense je vysoce kvalitní elektronické zařízení s vysokou citlivostí, se kterým je třeba zacházet šetrně:

- Zacházejte s přístrojem opatrně, nenechte jej upadnout a neházejte s ním.
- Důsledně dodržujte instalační pokyny, aby byla zajištěna správná a bezpečná instalace.
- **Babysense** není hračka. Nedávajte přístroj na hraní dětem.
- Do postýlky nedávajte další děti nebo domácí zvířata. **Babysense** nelze používat pro dvě děti spící v jedné postýlce.
- Přístroj nepoužívejte, pokud dochází k elektromagnetickému rušení.
- Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit provoz tohoto přístroje.
- Provozní zkoušku musíte provádět denně a vždy, když přemístíte monitor, vyměníte ložní prádlo nebo přemístíte postýlku (jak je uvedeno na straně 3).
- Zvlhčovač vzduchu nebo ventilátor nesmí být namířen přímo na postýlku.
- Zajistěte, aby všechny přebytné propojovací kabely byly schovány pod matrací a nebyly viditelné a dosažitelné, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
- Vložte čtyři nové 1,5V AA baterie stejného typu, nejlépe alkalické.
- **DŮLEŽITÉ:** Důrazně doporučujeme, aby se rodiče a pečovatelé naučili, jak poskytovat první pomoc.
- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu (déle než 3 měsíce), vyjměte baterie.
- Pokud máte s tímto přístrojem nějaké problémy, např. při nastavení, údržbě nebo používání, obraťte se na servisní pracovníky výrobce. Výrobce také informujte, pokud dojde k jakékoliv nečekané operaci nebo události.
- Přístroj nepoužívejte, pokud zjistíte změnu v provozu systému, je-li přístroj poškozen nebo pokud je některá jeho součást opotřebená nebo prodřená.
- Přístroj nesmí být používán v blízkosti jiného přístroje. Je-li potřeba jej používat v blízkosti jiného přístroje nebo společně s ním, je nutno přístroj sledovat a ověřit, zda v konfiguraci, ve které je používán, funguje normálně.

Vezměte prosím na vědomí

Babysense sleduje a upozorňuje na problém, ale nemůže zástavě dechu zabránit. **Babysense** pouze zaznamenává dech a dýchací pohyby, ale nemůže sledovat další jevy. Účelem přístroje je spustit výstrahu v případě zástavy nebo zpomalení dechu a dýchacího pohybu. **Babysense** představuje unikátní bezpečnostní systém, který pomáhá chránit kojence a dává rodičům (nebo pečovateltům) pocit bezpečí, protože umožňuje včasný zásah při nepravidelnostech dechu dříve, než se situace stane kritickou.

Existuje řada kroků, které jsou doporučovány pro **BEZPEČNÉ SPÁNÍ**:

- * Dítě ukládejte ke spánku zásadně na zádech.
- * Nekuřte v blízkosti dítěte.
- * Zajistěte, aby nedošlo k přehřátí vzduchu v místnosti.
- * Nenechávejte v dosahu dítěte žádné předměty, které by mohly představovat nebezpečí udušení.

Babysense je doplňkem těchto bezpečnostních opatření.

Babysense 1 Pro je monitor dechových pohybů pro kojence, kteří se ještě v postýlce nepohybují, a jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitý lékařský dohled. Přístroj **Babysense** může používat školený zdravotnický personál, jako jsou sestry, nebo uživatelé, kteří nejsou zdravotníci (např. rodiče nebo opatrovníci). **Babysense 1 Pro** je určen pro použití v nemocnicích a pro domácí použití.

Babysense nepřetržitě zaznamenává dech a dechové pohyby dítěte a v případě, že po dobu 20 sekund nedojde k pohybu nebo dechová frekvence klesne pod 10 dechů za minutu, spustí zvukový a vizuální alarm.

Systém je vybaven bezdotykovými senzorovými podložkami, které se ukládají pod matraci a dítě nijak neomezuji.

Instalace

1. Při vkládání baterií sejměte kryt baterií tím, že do otvoru zasunete široký plochý šroubovák (viz obrázek 6). Vyjměte pouzdro na baterie a vložte podle značek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vraťte pouzdro na baterie zpět a uzavřete kryt.

Poznámka: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy.

2. Kontrolní jednotku umístěte k základně postýlky mezi dvě tyčky, způsobem vyobrazeným na obrázku 1.




Obrázek 1


3. Umístění senzorových podložek:

- Pokud kojenec ještě neumí lézt, umístěte jednu senzorovou podložku podle obrázku 2. Ujistěte se, že je senzorová podložka umístěna pod plochou, kde dítě leží.
- Když dítě umí lézt a může se přesunout na místo, které není pokryté jednou senzorovou podložkou, doporučujeme zakoupit druhou senzorovou podložku a používat obě. Umístěte podle návodu na obrázku 2.

POZNÁMKA: Senzorové podložky musí být umístěny tak, aby byl nápis „THIS SIDE UP“ nahoru.

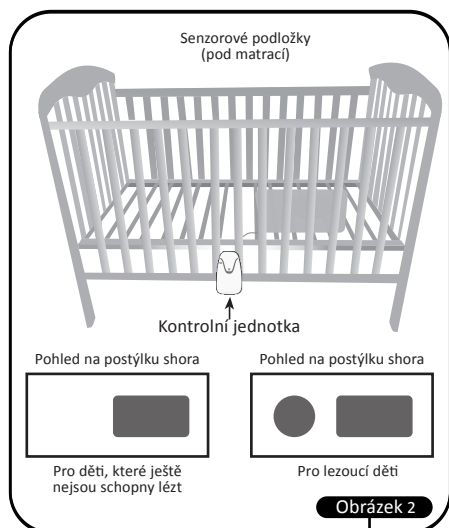

4. Protáhněte kabel/y ze senzorové/y podložky/ek otvorem v držáku (viz obrázek 3).

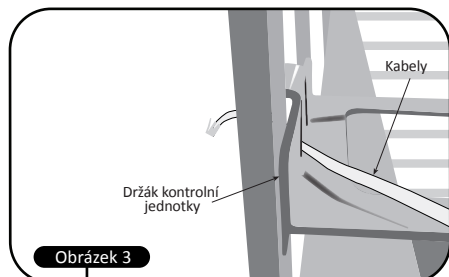

5. Konce kabelů připojte do zdířek na zadní straně kontrolní jednotky označených „SENSOR“ (viz obrázky 5 a 6). Používáte-li pouze jednu senzorovou podložku, zapojte kabel do libovolné zdířky.

POZNÁMKA: Nezapojujte žádné kabely do zablokované zdířky označené „DO NOT USE“.





6. Pokud design dětské postýlky/postele neumožňuje řádnou instalaci za pomoci držáku kontrolní jednotky, prosím využijte doplňkový háček pro zavěšení (viz obrázek 5) a zavěste kontrolní jednotku na spodní okraj postýlky.

7. Držák kontrolní jednotky pevně zatlačte do štěrbin v zadní části kontrolní jednotky (viz obrázky 4 a 5).

8. Položte matraci pevně na povrch senzorových podložek. Pokud matrace nemůže být v kontaktu se senzorovými podložkami nebo je-li základna postýlky měkká, vycpaná nebo pružinová, podložte senzorové podložky překližkou a poté na ně umístěte matraci.

9. V nemocniční postýlce - umístěte jednu senzorovou podložku na rošt postýlky. Ujistěte se, že je senzorová podložka pod dítětem. Položte matraci pevně na vrchní část senzorových podložek (viz obrázek 7).

DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo možnému nebezpečí úrazu, musí být nadbytečné kabely smotány a uloženy pod matrací, aby nebyly viditelné a dosažitelné.

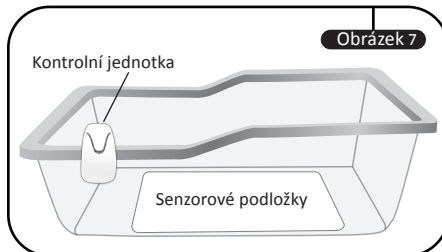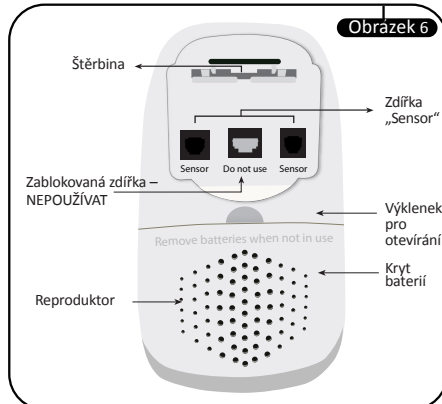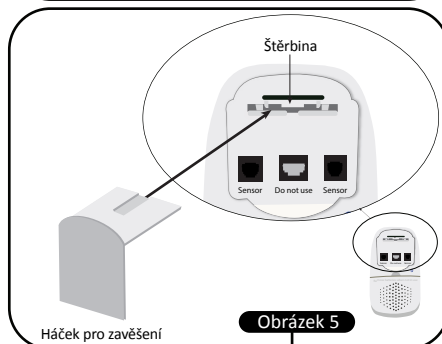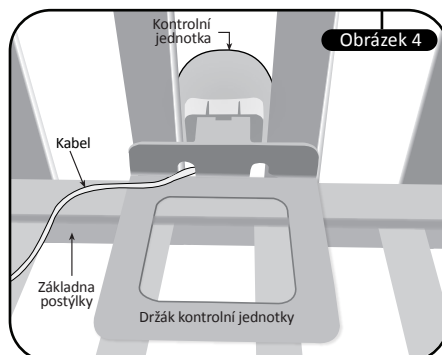

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!