

Jednorazový Alko-test

Jednorazový alkohol tester je určený na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu.

Tento produkt je určený pre osobné použitie a ma iba informatívny charakter. Produkt nie je navrhnutý alebo schválený úradmi v dôsledku čoho nemôže byť použitý ako evidencia pre prítomnosť alkoholu v dychu v prípadných súdnych sporoch. Vodič je zodpovedný za interpretáciu nameraných výsledkov. Výrobca, ako aj distribútori nie sú zodpovední za použitie tohto produktu inak, ako je napísané v návode.

Miera alkoholu sa zvyšuje až do hodiny po požití/konzumácii alkoholu. Aj najnižšia možná miera alkoholu v krvi môže ovplyvniť vašu schopnosť viezť akýkoľvek dopravný prostriedok. Realizujte aspoň 2 testy na potvrdenie znižujúcej sa hladiny alkoholu v tele.

Návod na použitie:

1. Odstráňte ochranné vrchnáky z oboch strán rúrky
2. Vložte modrý koniec rúrky do balónika
3. Fúkajte do rúrky tak, aby sa nafúkol balónik
4. Po 2 minútach porovnajte výsledok s farebnou škálou. Výsledok neporovnávajte po 10 minútach

ZAMERAJTE SA NA ČIERNE MIESTA. NIKTORÉ KRIŠTÁLY MENIA FARBU V RÔZNYCH INTENZITÁCH. BIELE MIESTA MÔŽU BYŤ VIDITEĽNÉ AJ NAPRIEK PRÍTOMNOSTI ALKOHOLU.

Poznámka:

Každá farebná zmena na kryštáloch v Alko testery po skúške dychu znamená prítomnosť alkoholu v dychu. Tento produkt nie je oficiálne certifikovaný, a teda nie je možné ho použiť ako evidenciu v súdnom spore. Každé podozrenie na alkohol v dychu (odhliadnuc od výsledku testu) je dôvod na to, aby si človek nesadal za volant dopravného prostriedku. V takomto prípade je nutné použiť test, ktorý je certifikovaný, kalibrovaný (tzv. Alkohol tester) a používaný úradmi na reálne zistenie alkoholu v dychu.

Jednotlivé časti produktu:

Sklenená rúrka, ochranné vrchnáky, meracia látka (jódomá zlučienina), absorpčné granule, filtre, balónik, pišťalka.

Upozornenie:

Jednotlivé časti môžu byť nebezpečné, hrozí prehltnutie. Meracia látka nie je jedovatá. Sklenená rúrka sa môže zlomiť, hrozí porezanie.

Opatrenia:

Nevyberajte meraciu látku z testera!

Udržujte mimo dosahu detí!

Zabráňte priamemu kontaktu meracej látky s očami alebo pokožkou!

Neprehltajte ani nevdychujte!

Nehádzte do ohňa!

V prípade rozbitia alko testera a následného kontaktu meracej látky s očami, vymyte oči čistou tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite miesto vodou.

V prípade prehltnutia vypite väčšie množstvo vody, za účelom zriedenia v žalúdku a vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade vdýchnutia chodte na čerstvý vzduch a konzultujte s lekárom podľa potreby.

Skladovanie:

1. skladujte mimo priameho slnečného žiarenia a tepla

2. skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

www.alcoforce.com

DISTRIBUTOR:

Work and Road Safety Corporation s.r.o.

Kolbenova 610/26,

19000 Praha

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!