

LANAFORM

HEALTH

CN-100 ^P

COMPRESSOR NEBULIZER

KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR
NÁVOD K OBSLUZE



LOWER & UPPER
AIRWAYS



ADULT
CHILD



BATTERY



USB
POWERED



PARTICLE
SIZE



NEBULISATION
RATE

NÉBULISEUR À
COMPRESSION

DRUK-
VERSTUIVER

KOMPRESSIJS-
VERNEBLER

NEBULIZADOR DE
COMPRESIÓN

NEBULIZZATORE
A COMPRESIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 0197

Dispositivo Medico

Classe IIa

La società LANAFORM, dichiara che il dispositivo medico « CN-100P » Lot001 LA0900420 è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE relativa ai dispositivi medici e al suo ultimo emendamento 2007/47/CE.

GARANZIA LIMITATA

LANAFORM garantisce che questo prodotto è esente da vizi materiali e di fabbricazione per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto, fatta eccezione per le seguenti condizioni specifiche.

La garanzia LANAFORM non copre i danni causati da una normale usura di questo prodotto. Inoltre, la garanzia su questo prodotto LANAFORM non copre danni causati in seguito ad utilizzo improprio o abusivo o di qualsiasi uso errato, incidenti dovuti al collegamento di accessori non autorizzati, modifiche apportate al prodotto o di qualsiasi altra condizione di qualsiasi natura, che sfugga al controllo di LANAFORM.

LANAFORM non è responsabile per qualsiasi danno accessorio, consecutivo o speciale.

Qualsiasi garanzia implicita o esplicita di conformità del prodotto è limitata ad un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto iniziale e laddove sia disponibile una copia della prova di acquisto.

Una volta ricevuto l'apparecchio, LANAFORM si riserva di ripararlo o sostituirlo a seconda del caso e di rispedirlo al cliente. La garanzia vale solo per interventi tramite il Centro Assistenza LANAFORM. Qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto affidato a persone esterne al Centro assistenza LANAFORM invalidano la presente garanzia.


Návod k obsluze

Fotografie a další obrázky produktu v této příručce a na obalu jsou co nej přesnější reprodukci produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali kompresorový inhalátor LANAFORM CN-100P. Kombinace sofistikované techniky a snadného použití tohoto inhalátoru pomáhá předcházet onemocněním horních a dolních cest dýchacích, omezuje jejich vedlejší účinky a urychluje regeneraci. Kompresor pohání vzduch do soupravy pro rozprašování. Když vzduch pronikne soupravou na rozprašování, předepsané léčivo se přemění na aerosol mikroskopických kapeček, které je možné snadno vdechnout. Tento výrobek je zdravotnický prostředek a je určen k použití doma. Léčivé přípravky používejte pouze po konzultaci s lékařem.

FUNKCE NEBULIZAČNÍ SADY

Léčivo se smísí se stlačeným vzduchem generovaným kompresorovým čerpadlem. Stlačený vzduch smíchaný s léčivem se přemění na jemné částice a odpařuje se, když se srazí s deflektorem.

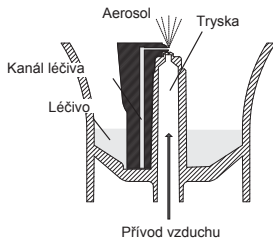

POUŽITÉ SYMBOLY

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly:

	Pozor	Upozornění na možná nebezpečí, která vás mohou zranit nebo poškodit vaše zdraví.
	Poznámka	Upozornění na možné poškození, které může zařízení způsobit.
	Poznámka	Upozornění na důležité informace.

SYMBOLY POPIS A VÝZNAM SYMBOLŮ:

Na obalu a štítku zařízení a příslušenství jsou uvedeny následující symboly:

Symbol	Popis
	Přístroj splňuje základní požadavky směrnice 93/42 / EHS o zdravotnických prostředcích
	Dovozce do země EU: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Evropa) Maslow, Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Německo
	Výrobce: Shenzhen Kingyield Technology Co., Ltd. Section C, Futai Industrial Zone, FuYong Town, BaoAn, ShenZhen, China
	Výrobní číslo
	zařízení typu BF
	Návod k obsluze.
	Postupujte podle pokynů v této příručce. Krytí přístroje proti prachu a vodě.
	Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s národními směrniciemi o nakládání s odpady

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny informace uvedené v návodu k použití a v dokumentaci obsažené v balení.

Při používání elektrického zařízení a obzvláště za přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to zejména:

- ⚠** Při používání tohoto výrobku se ujistěte, že splňujete všechny níže uvedené dily.
- Dodržíte pokyny lékaře a zdravotnického personálu, pokud jde o povahu léku a jeho dávkování.
- Pokud při používání přístroje zaznamenáte nějaké neobvyklé reakce, pocity nebo problémy, okamžitě ho přestaňte užívat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte samotnou vodu v rozprašovači pro vdechování.
- Vyčistěte a dezinfikujte soupravu rozprašování, masku pro dítě a dospělou osobu a nástavec před prvním použitím, pokud zařízení nebylo delší dobu používáno nebo pokud několik uživatelů používá stejné zařízení.
- Po použití všechny součásti vydezinfikujte a vysušte.
- Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj obsahuje malé části, které mohou být spolknuty.

- Vzduchovou hadičku vždy dobře vysušte od kondenzátu nebo zbytků léků.
- Nenechávejte čisticí roztok v součástech nebulizátoru. Po dezinfekci je opláchněte v horké vodě..
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl být vystaven škodlivým výparům nebo těkavým látkám.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na místech společně s hořlavinami.
- Během používání nezakrývajte kompresor žádným krytem nebo jiným předmětem.
- Vždy použijte novou dávku léku.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nepoužívejte kompresor nebo kabel USB, pokud jsou mokré a nepřipojujte je do elektrické zásuvky nebo jiných zařízení s mokřými rukama.
- Kompresor není vodotěsný. Na tyto komponenty neaplikujte vodu ani žádné jiné kapaliny. Pokud do těchto součástí dojde k rozliti kapaliny, okamžitě odpojte USB kabel a tekutinu nasajte pomocí gázové vložky nebo jiné absorpční látky.
- Neponořujte kompresor do vody ani do jiné kapaliny.
- Zařízení nepoužívejte ani nepřechovávejte na vlhkých místech, jako je koupelna.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je kabel USB poškozen.
- Chraňte USB kabel před horkými předměty.
- Přečtěte si pokyny "Důležité informace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)", které jsou uvedeny v části Technické údaje.
- Toto zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru v blízkosti dětí nebo nemocných.
- Přesvědčte se o správném připojení příslušenství.
- Ujistěte se, že před použitím byla nebulizační nádoba správně nainstalována.
- Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr správně nasazen.
- Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr čistý. Pokud filtr změnil barvu nebo byl běžně používán více než 60 dní, vyměňte jej za zcela nový vzduchový filtr.
- Chraňte kompresor před poltím jakoukoliv kapalinou.
- Nenakládejte nebulizační nádobu v úhlu větším než 45° a netešte s ní, když je zařízení v chodu..
- Zařízení nepoužívejte, pokud je vzduchová trubka poškozena.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Nedávejte více než 10 ml léku do zásobníku léku.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru za přítomnosti malých dětí nebo jednotlivců se sníženým smyslovým jednáním.
- Nevstavujte přístroj ani jeho součásti nárazům nebo pádům.
- Nevkládejte prsty ani žádné předměty do kompresoru.
- Nerozebírejte nebo se nepokoušejte opravit kompresor nebo kabel USB.
- Nenechávejte zařízení nebo jeho součásti v místech, kde je teplota vyšší než rozsah uvedený v technických údajích tohoto návodu k použití.
- Nevstavujte zařízení ani jeho části na místech, kde budou vystaveny extrémním teplotám nebo změnám vlhkosti, například ve vozidle, nebo na místech, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření.
- Neblokujte kryt vzduchového filtru.
- Nikdy nepoužívejte přístroj během spánku.

- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, myčku na nádobí ani vysoušeč vlasů k usušení přístroje nebo jeho součástí.
- Schválen pouze pro použití lidmi.
- Dlouhé používání zařízení může zkrátit jeho životnost. Nepoužívejte toto zařízení po dobu delší než 15 minut a počkejte nejméně 40 minut před dalším použitím.
- Pokud se zařízení pohybuje, může se hlavní jednotka zahřát.
- Nedotýkejte se hlavní jednotky, pokud to není nutné, například pro přepnutí zařízení během provozu.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zkontrolujte zařízení a součásti před každým použitím a ujistěte se, že nejsou zjištěny žádné závady. Zkontrolujte zejména následující body:
 - Nebulizační nádoba, tryska, maska a vzduchová hadička nesmí být poškozeny.
 - Tryska nesmí být blokována.
 - Kompresor musí běžet normálně.
- Kompresor v provozu vydává zvuky a vibrace. Emisí stlačeného vzduchu ze soupravy pro rozprašování také generuje šum. Tento šum je normální a není známkou poruchy.
- Používejte zařízení pouze pro určené účely. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
- Zařízení nepoužívejte při teplotách nad + 40 ° C a při teplotě nižší než 5 ° C.
- Zkontrolujte, zda je vzduchová hadička správně připojena ke kompresoru a nebulizační nádobě.
- Pokud se zařízení nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterie.
- Pozorně si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je k pozdějšímu nahlédnutí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!