

Veroval®

upper arm blood pressure monitor



| | |
|---|--------|
| CZ - Pažní tlakoměr <i>Návod k použití</i> | 2-32 |
| SK - Ramenný tlakomer <i>Návod na použitie</i> | 33-63 |
| HU - Felkaros vérnyomásmérő <i>Használati utasítás</i> | 64-95 |
| BG - Апарат за измерване на кръвното налягане на ръката над лакътя <i>Ръководство за употреба</i> | 96-131 |
| Záruční list / Záručný list / Jótállási jegy / Гаранционна карта | 133 |

HARTMANN



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro nákup lékařského tlakoměru společnosti HARTMANN. Pažní tlakoměr Veroyal® je kvalitní výrobek k plně automatickému měření tlaku na paži dospělých osob a je vhodný k použití v klinické praxi i v domácnostech. Tento přístroj umožňuje bez předcházejícího nastavení, díky pohodlnému automatickému napumpování, snadné, rychlé a přesné měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence. Navíc vás upozorní na případný nepravidelný srdeční tep.

Pomocí přiloženého USB kabelu lze připojit tlakoměr k počítači. Na počítači můžete vyhodnocovat naměřené hodnoty softwarem Veroyal® medi.connect.

Přejeme vám hodně zdraví a vše dobré.



Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte, protože správné měření krevního tlaku je možné pouze při správném zacházení s přístrojem. Tento návod k použití vám ukáže jednotlivé kroky měření krevního tlaku s pomocí pažního tlakoměru Veroyal®. Tyto důležité pokyny vám pomohou získat spolehlivé výsledky o vašem krevním tlaku. Tento přístroj používejte podle návodu k použití a návod si pečlivě uschovejte. Uložte ho na bezpečném místě a zpřístupněte ho ostatním uživatelům. Zkontrolujte přístroj, zda je jeho obal nepoškozený, a zkontrolujte také úplnost obsahu.

Obsah balení:

- Tlakoměr k měření krevního tlaku
- Univerzální manžeta
- Baterie 4 x 1,5V AA
- USB kabel
- Textilní obal na uložení přístroje
- Návod k použití se záručním listem

| Obsah | Strana |
|--|---------------|
| 1. Popis přístroje a displeje | 4 |
| 2. Důležitá upozornění | 6 |
| 3. Informace o krevním tlaku..... | 12 |
| 4. Příprava měření..... | 13 |
| 5. Měření krevního tlaku | 15 |
| 6. Funkce paměti..... | 19 |
| 7. Přenos naměřených hodnot do programu Veroyal® medi.connect..... | 21 |
| 8. Vysvětlení zobrazených chyb na displeji | 22 |
| 9. Údržba přístroje | 23 |
| 10. Příslušenství..... | 24 |
| 11. Záruční podmínky..... | 24 |
| 12. Kontaktní údaje..... | 25 |
| 13. Technické údaje..... | 25 |
| 14. Adaptér pro napájení ze zásuvky..... | 27 |
| Elektromagnetická kompatibilita..... | 28 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!