

# Veroval<sup>®</sup>

wrist blood pressure monitor



<b>CZ - Zápěštní tlakoměr</b> <i>Návod k použití</i> .....	2-33
<b>SK - Zápästný tlakomer</b> <i>Návod na použitie</i> .....	34-64
<b>HU - Csuklós vényomásmérő</b> <i>Használati utasítás</i> .....	65-95
<b>BG - Апарат за измерване на кръвното налягане на китката</b> <i>Ръководство за употреба</i> .....	96-130
<b>Záruční list / Záručný list / Jótállási jegy / Гаранционна карта</b> .....	131

HARTMANN



## Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro nákup lékařského tlakoměru společnosti HARTMANN. Tlakoměr Veroyal® k měření krevního tlaku na zápěstí je kvalitní výrobek k plně automatickému měření tlaku na zápěstí dospělých osob a je vhodný k použití v klinické praxi i v domácnostech. Tento přístroj umožňuje bez předcházejícího nastavení, díky pohodlnému automatickému napumpování, snadné, rychlé a přesné měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence.

Navíc vás upozorní na případný nepravidelný srdeční tep.

Pomocí přiloženého USB kabelu lze připojit tlakoměr k počítači. Na počítači můžete vyhodnocovat naměřené hodnoty softwarem Veroyal® medi.connect.


Přejeme vám hodně zdraví a vše dobré.



Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte, protože správné měření krevního tlaku je možné pouze při správném zacházení s přístrojem. Tento návod k použití vám ukáže jednotlivé kroky měření krevního tlaku s pomocí zápěstního tlakoměru Veroyal®. Obdržíte důležité a užitečné tipy, které vám pomohou získat spolehlivé výsledky o vašem krevním tlaku. Tento přístroj používejte podle návodu k použití a návod si pečlivě uschovejte. Uložte ho na bezpečném místě a zpřístupněte ho ostatním uživatelům. Zkontrolujte přístroj, zda je jeho obal nepoškozený, a zkontrolujte také úplnost obsahu.

### Obsah balení:

- Tlakoměr k měření krevního tlaku
- 2 x baterie 1,5V AAA
- USB kabel
- Krabička na uložení
- Návod k použití se záručním listem

Obsah	Strana
1. Popis přístroje a  displeje.....	4
2. Důležitá upozornění .....	5
3. Informace o krevním tlaku.....	11
4. Příprava měření.....	13
5. Měření krevního tlaku .....	15
6. Funkce paměti.....	19
7. Přenos naměřených hodnot do programu Veroyal® medi.connect.....	21
8. Vysvětlení zobrazených chyb na displeji.....	23
9. Údržba přístroje.....	24
10. Záruční podmínky.....	25
11. Kontaktní údaje.....	26
12. Technické údaje.....	26
 Elektromagnetická kompatibilita.....	 29

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!