

FAQ

1. Jde minimalizovat vlastní diagnostický režim?

Vlastní diagnostický režim je důležitý proces, který chrání čidlo od environmentálních materiálů a plynů. Tento proces zajišťuje přesnost a dlouhodobou stabilitu čidla. Tato funkce bývá v zařízeních, aby se předešlo chybným měřením. Tento režim můžete minimalizovat tím, když na zařízení budete nechávat nasazený kryt.

2. Jak získat co nejpřesnější výsledky měření?

Je důležité foukat do zařízení plynule. Nadechněte se a zadržte dech na 2 sekundy. Potom začněte foukat. Snažte se foukat pokaždé stejně.

3. Musím měnit jednorázový náustek před každým testem?

Pokud jste jediná osoba, která používá tohle zařízení, můžete používat vestavěný náustek. Pokud zařízení používá více uživatelů, každý by měl mít svůj vlastní náustek.

4. Proč zařízení ukazuje, že foukám špatně?


Ujistěte se, že máte staženou aplikaci KTEOSCAN a spárovanou s vaším zařízením. Následujte instrukce na obrazovce. Aplikace vám řekne kdy a jak foukat. Až začnete foukat uslyšíte pípání. Foukejte cca 3 sekundy, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Pokud foukání stále nevyhovuje zkuste foukat do náustku silněji, jako byste nafukovali balónek.

KETOSCAN^{MINI}

Kontrola spalování tuků v reálném čase

MANUÁL

Balení obsahuje

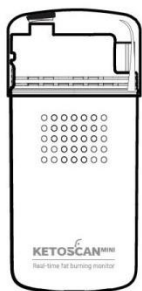


Ketoscan mini



Náustek (5x)



Igelitový sáček
(na náustky)

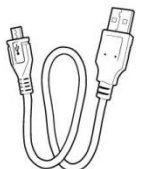

USB kabel (5pin)



Hliníkový sáček




Pouzdro

DULEŽITÉ!


1. Čidlo Ketoscanu mini je potřeba vyměnit po 300 měřeních nebo 12 měsících. Jinak zařízení nebude fungovat.
2. Pokud je zařízení zamčené nebo nefunguje, kontaktujte distributora.
3. Následující věci mohou ovlivnit měření: Konzumace alkoholu v posledních 24h. Pití kávy, džusu nebo jiných nápojů, ústní voda, čištění zubů nebo kouření v posledních 30 minutách před měřením.
4. Pokud bude výsledek vyšší než 60ppm, zopakujte měření a následujte pozorně instrukce. Pokud znovu naměříte tuto

hodnotu, můžete být ve velkém nebezpečí a mít ketoacidosis. Může být ve vážném ohrožení vašeho zdraví. Pokud máte Ketoacidosis potřebujete lékařskou pomoc.

5. KETOSCAN MINI poskytuje pouze kontrolní měření.

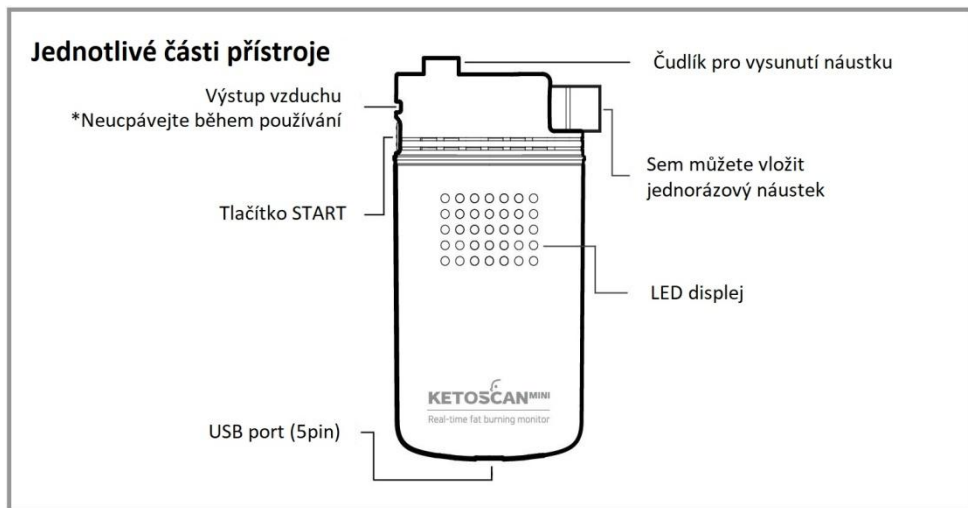


Informace zobrazované na displeji

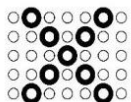


Slabý vzorek dechu

Způsobeno slabým nebo přerušovaným vdechováním. Počkejte několik sekund dokud zařízení nebude znovu připravené, potom se nadechněte zadržte dech na 2 sekundy a plynule vdechněte do zařízení po dobu 3 sekund.

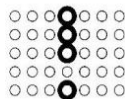


Je potřeba vyměnit čidlo (zařízení je nefunkční)

Čidlo je potřeba vyměnit po 300 měřeních pro přesné výsledky. Prosim kontaktujte distributora.

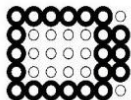


Nízký stav baterie

Nabijte zařízení připojením USB kabelu.

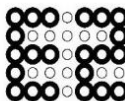


Chyba čidla

Byla zjištěna porucha čidla. Prosim kontaktujte distributora.

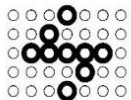


Baterie se nabíjí (bliká)

Baterie bude nabitá za necelou hodinu.

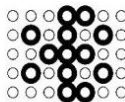

Bluetooth mode

Zařízení je připojeno k mobilní aplikaci Ketoscan.

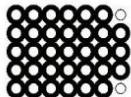

Baterie je nabitá

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!