


# TUCKY - Smart teploměr a monitor polohy



## Návod k použití

### Popis produktu

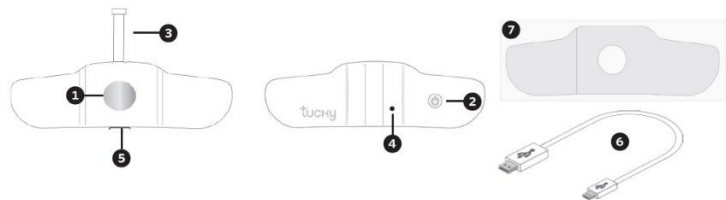

1. Senzor měření
2. Vypínač
3. Micro USB port s krytkou
4. LED kontrolka zapnutí/vypnutí
5. USB port
6. Nabíjecí kabel
7. Oboustranná lepicí náplast

### Obecné informace

Tucky-21 je neinvazivní a opakovaně použitelné elektronické zařízení pro domácí použití a neinvazivní a použitelné zařízení pro jednoho pacienta v nemocnici. Tento produkt je určen k nepřetržitému monitorování tělesné teploty v podpaží pro děti starší 29 dnů a pro dospělé.

Tucky-21 také umožňuje sledování polohy u dětí starších 29 dnů a u dospělých (není to však součástí jeho lékařského použití). Pokud je to možné, umísťuje se do pravého podpaží pomocí speciální oboustranné náplasti (ADH-21 nebo ADH-21B) a přenáší data do aplikace „Tucky“ na vašem smartphonu.

### Monitorování teploty

Teploměr je nastaven v přímém režimu: měří skutečnou teplotu v podpaží. Měli byste počkat asi 15 minut po umístění náplasti Tucky do podpaží, aby se teplota stabilizovala. Teplota je zobrazena barevným kódem, který označuje, zda je normální nebo ne.

**Tabulka barev podle teploty v podpaží**

Zelená (normální teplota)	Oranžová (vysoká teplota)	Červená (velmi vysoká teplota)	Šedá (teplota není relevantní)
34.7 až 37.3°C	37.3 až 38.4°C	Nad 38.4°C	Měřeno s rukou od těla*
Poznámka: rektální teplota je obvykle o 0.7 °C vyšší než teplota v podpaží.			

\*Ruka musí být u těla, aby nebylo měření rušeno okolním prostředím. Normální teplota se liší podle jednotlivce (věk, pohlaví, hmotnost, typ postavy), denní doby a faktorů vnějšího prostředí (okolní teplota, oblečení atd.). Je proto normální zaznamenat teplotní výkyvy způsobené změnami prostředí nebo polohy ruky.

Jakmile teplota překročí hodnotu velmi vysoké teploty, přijde vám upozornění. Tuto hranici teploty, kdy vám přijde upozornění, si můžete v aplikaci upravit podle vašich potřeb.

### Monitorování změny polohy

Zařízení také umožňuje monitorování změny polohy, vhodné zejména u kojenců. Ikona v aplikaci označuje, zda je dítě v jedné z následujících 4 poloh: stojící nebo sedící, ležící na zádech, ležící na břiše a ležící na boku.

Jakmile se dítě převrátí na břicho, přijde vám upozornění. Tento typ upozornění lze v aplikaci deaktivovat.

Poznámka: Pro zajištění této funkce musí být zařízení umístěno v pravém podpaží.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý tento návod k použití, abyste zajistili spolehlivost údajů.

- Tucky-21 je měřicí nástroj, ale není diagnostickým nástrojem. Nenahrazuje sledování dalších příznaků ani konzultaci s lékařem.
- Nepoužívejte tento teploměr k měření teplot podchlazení.
- Tucky-21 by měl být nanášen pouze s dodávanou oboustrannou náplastí (ADH-21 nebo ADH-21B) na čistou pokožku bez naneseného jakéhokoli krému a tělového mléka. Náplasti jsou na jedno použití a nelze je přemístit. Během používání zajistěte, aby sonda zůstala v nepřetržitém kontaktu s pokožkou.
- Pokud máte v podpaží chloupky, oholte je, aby se co nejvíce zvýšil kontakt náplasti Tucky s pokožkou.
- V případě silného pocení nebo použití při sportovních aktivitách může být na zařízení aplikováno jednostranné lékařské lepidlo, aby se zlepšila přilnavost. Seznam doporučených lepidel je k dispozici na webu výrobce.
- Neaplikujte zařízení na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo pokud byla u pacienta zjištěna alergie na plasty (typ elastomeru nebo silikonu a/nebo lepidla).
- Teploměr lze nosit až do vybití baterie, náplast však nesmí být v kontaktu s pokožkou déle než 24 hodin. Pokud je pokožka zarudnutá, před opětovným použitím teploměru vyčkejte, dokud zarudnutí nezmizí. Pokud dojde k podráždění, okamžitě teploměr odstraňte a vyhledejte lékaře.
- Teploměr a náplasti by se měly používat za normálních podmínek teploty a vlhkosti (viz Technické údaje). V opačném případě nelze zaručit přesnost měření.
- Teploměr a náplasti musí být přepravovány, skladovány a ukládány na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, oheň, kontaminaci a ve specifikovaných teplotních a vlhkostních rozsazích (viz Technické údaje).
- Teploměr nesmí být ponořen do vody. Před koupáním nebo sprchováním teploměr odstraňte.
- Teploměr byl navržen tak, aby se přizpůsobil zakřivení těla. Neotáčejte jím a nepokoušejte se jej otevřít, opravit nebo upravit. Teploměr nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Nepoužívejte teploměr v blízkosti zařízení vydávajících silné vlny (skenery, přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení), která by mohla narušit jeho funkci (viz. Testování elektromagnetů).
- Nepoužívejte teploměr a náplasti, pokud je překročena doba jejich životnosti (viz Technické údaje).
- Udržujte teploměr a jeho příslušenství (náplasti, nabíjecí kabel) mimo dosah dětí. Musí je používat dospělí.
- Teploměr se nesmí nosit během jeho nabíjení.
- Zkontrolujte, zda je váš smartphone/tablet kompatibilní

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!