



- CS** Měřič krevního tlaku na zápěstí  
Návod k použití ..... 2
- SK** Prístroj na meranie tlaku na zápästí  
Návod na použitie ..... 27



**Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.**

## **Vážená zákaznice, vážený zákazníku,**

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu i péče o krásu. Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem,  
Váš tým společnosti Beurer

## **Obsah**

|  |    |                                      |    |
|--|----|--------------------------------------|----|
| 1. Obsah balení .....                  | 3  | 7. Použití .....                     | 12 |
| 2. Vysvětlení symbolů.....             | 3  | 8. Čištění a údržba.....             | 20 |
| 3. Použití v souladu s určením.....    | 5  | 9. Co dělat v případě problémů?..... | 21 |
| 4. Varovné a bezpečnostní pokyny ..... | 6  | 10. Likvidace .....                  | 22 |
| 5. Popis přístroje.....                | 9  | 11. Technické údaje.....             | 22 |
| 6. Uvedení do provozu .....            | 10 | 12. Záruka/servis.....               | 24 |





## 1. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x měřič krevního tlaku na zápěstí s manžetou
- 1 x návod k použití
- 1 x zápisník měření
- 1 x úložné pouzdro
- 2 x baterie 1,5 V AAA typu LR03

## 2. Vysvětlení symbolů

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Varování</b><br>Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví                  |
|  | <b>Pozor</b><br>Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství                        |
|  | <b>Informace o výrobku</b><br>Upozornění na důležité informace   |
|  | <b>Dodržujte návod</b><br>Před zahájením práce a/nebo obsluhy přístrojů nebo zařízení si přečtěte návod. |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!