

beurer

HK 67 To Go



CZ **Výhřevná poduška**

Návod k použití2-8

Obsah

1. Obsah balení	3	4.5 Zapnutí.....	6
1.1 Popis zařízení.....	3	4.6 Nastavení teploty	6
2. Důležité pokyny		4.7 Vypnutí.....	6
Uschovejte pro pozdější použití	3	4.8 Doba automatického vypnutí.....	7
3. Použití v souladu s určením.....	5	5. Čištění a údržba.....	7
4. Ovládání	5	6. Uložení.....	7
4.1 Bezpečnost.....	5	7. Likvidace	8
4.2 Nabíjení powerbanky	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	8
4.3 Nabíjení chytrého telefonu pomocí powerbanky	6	9. Technické údaje.....	8
4.4 Používání vyhřevné podušky	6	10. Náhradní díly.....	8

Vysvětlení symbolů

	Čtěte pokyny!		Extra jemné praní na 30 °C
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce
			Nežehlit
	Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená!		Nečistit chemicky
	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).		
	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví		
	POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.		
	UPOZORNĚNÍ; upozornění na důležité informace		

1. Obsah balení

- 1x powerbanka
- 1x vyhřevná poduška
- 1x plátěný pytlík
- 1x nabíjecí kabel
- 1x tento návod k použití

1.1 Popis zařízení

- 1 Powerbanka s LED kontrolkou
- 2 Vyhřevná poduška
- 3 Vypínač s LED kontrolkou
- 4 Propojovací kabel
- 5 Nabíjecí kabel
- 6 Plátěný pytlík na uložení



2. Důležité pokyny

Uchovejte pro pozdější použití



VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i k ochraně produktu. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod k použití v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat malé děti (3–8 roky), ledaže by spínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo dostatečně poučeno, jak má s vyhřevnou poduškou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.

- Děti si s výhřevnou podušku nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato výhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Do podušky nepichujte žádné špendlíky.
- Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená.
- Nepoužívejte, jste-li mokří.
- Tuto výhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s napětím uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této výhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této výhřevné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekrutě s nimi nebo je nelámejte.
- Výhřevnou podušku a powerbanku je třeba často kontrolovat, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, výhřevná poduška nebo powerbanka nebyly správně používány, je třeba je před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- Pokud je poškozen síťový kabel výhřevné podušky, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Jestliže je výhřevná poduška zapnutá, nesmí se na ni pokládat
 - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. Jinak by se mohla powerbanka přehřát a nenapravitelně poškodit.
- Nikdy nevystavujte powerbanku extrémnímu horku. Platí to zejména pro ukládání v autě. Při delším stání vozidla vznikají vysoké teploty ve vnitřním prostoru a odkládací schránce. Nenechávejte proto powerbanku ve vozidle.
- Powerbanka se nesmí současně nabíjet a vybíjet.
- Nikdy nenabíjejte powerbanku přes USB port na počítači, protože by mohlo dojít k jeho přetížení.
- Během nabíjení powerbanku nezakrývejte dekou, polštářem a podobně, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
- Při používání síťového adaptéru USB musí být příslušná zásuvka vždy dobře přístupná, aby bylo v případě nebezpečí možné ihned adaptér odpojit. Dodržujte přitom návod k použití výrobce síťového adaptéru USB.

- Nebezpečí výbuchu! Chybná manipulace s akumulátory může způsobit požár, výbuch, únik nebezpečných látek do okolí nebo jiné nebezpečné situace! Powerbanku nevhazujte do ohně, protože by mohl integrovaný akumulátor explodovat.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se musí před použitím správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Tato výhřevná poduška je určena pro zahřívání lidského těla.

Tato výhřevná poduška je určena pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.

4. Ovládání

4.1 Bezpečnost



POZOR

Výhřevná poduška je vybavena funkcí BEZPEČNOSTNÍHO VYPNUTÍ. Bezpečnostní systém automatickým vypnutím v případě problému zabrání přehřátí výhřevné podušky. Jestliže dojde k BEZPEČNOSTNÍMU VYPNUTÍ, nebude již v zapnutém stavu svítit vypínač u výhřevné podušky (3) ani modrá LED kontrolka na powerbance (1). Po ochlazení na pokojovou teplotu můžete výhřevnou podušku opět zapnout.

4.2 Nabíjení powerbanky



POZOR

Před nabíjením powerbanky (1) si přečtěte pokyny z kapitoly 2 „Důležité pokyny“ a dodržujte je.

Powerbanku musíte zcela nabít před prvním použitím nebo po delším nepoužívání přístroje. Jestliže je powerbanka úplně vybitá, bude nabíjení trvat cca. 6 hodin, než se kompletně nabije. Při nabíjení powerbanky postupujte takto:

- Zapojte nabíjecí kabel (5), který je součástí balení, do zdířky powerbanky.
- Připojte druhý konec nabíjecího kabelu přes USB k nabíječce USB (nabíječka USB, 5 V / 1 A SELV podle požadavků normy IEC/EN 60335, není součástí balení). Během nabíjení bliká LED kontrolka na powerbance zeleně.
- Jakmile LED kontrolka na powerbance svítí trvale zeleně, je powerbanka zcela nabitá (u vybité powerbanky za 6 hodin). Poté powerbanku odpojte od nabíječky.
- Po odpojení powerbanky od nabíječky USB zelená LED kontrolka na powerbance zhasne.
- Powerbanka by se měla nabíjet alespoň 1krát za rok, aby byla zajištěna její kapacita.
- Během nabíjení powerbanku nezakrývejte dekou, polštářem a podobně, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
- Powerbanku nabíjejte jen v suchém prostředí a při běžné pokojové teplotě.

4.3 Nabíjení chytrého telefonu pomocí powerbanky


Powerbanku můžete používat pro napájení výhřevné podušky i pro nabíjení chytrého telefonu. Při nabíjení chytrého telefonu pomocí powerbanky postupujte takto:

- Připojte powerbanku k chytrému telefonu pomocí originálního nabíjecího USB kabelu výrobce chytrého telefonu.



4.4 Používání výhřevné podušky

- Přiložte výhřevnou podušku na břicho nebo na záda. Poté výhřevnou podušku upevněte k tělu pomocí dlouhého pružného gumového pásu se suchým zipem.

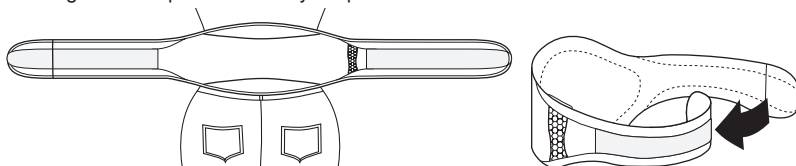

- Zasuňte nabitou powerbanku (1) do integrované kapsy u výhřevné podušky (2).
- Zasuňte zástrčku propojovacího kabelu (4) výhřevné podušky do zdířky powerbanky. LED kontrolka vypínače (3) u výhřevné podušky se třikrát krátce bíle rozsvítí. Výhřevná poduška je nyní připravena k provozu.



POZOR

Ujistěte se, že se výhřevná poduška při používání neshrnula nebo se nevytvořily záhyby.

4.5 Zapnutí

- Stiskněte vypínač (3) a zapněte výhřevnou podušku (2). LED kontrolka vypínače nyní svítí zeleně (minimální teplo). LED kontrolka u powerbanky (1) svítí modře.
- Pokud znovu stisknete vypínač, zvýší se stupeň teploty (středně vysoké teplo). LED kontrolka vypínače svítí žlutě.
- Pokud znovu stisknete vypínač, zapne se nejvyšší stupeň teploty výhřevné podušky (maximální teplo). LED kontrolka vypínače svítí červeně.
- Pokud znovu stisknete vypínač, výhřevná poduška se vypne. LED kontrolka vypínače a LED kontrolka u powerbanky zhasnou.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám kůže.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je powerbanka (1) téměř vybitá, vypne se výhřevná poduška automaticky na ochranu powerbanky. Powerbanku pak musíte nabít.

4.6 Nastavení teploty

VYPNUTO: vypínač (3) nesvítí

Stupeň 1: minimální teplo (LED kontrolka vypínače svítí zeleně)

Stupeň 2: středně vysoké teplo (LED kontrolka vypínače svítí žlutě)

Stupeň 3: maximální teplo (LED kontrolka vypínače svítí červeně)

4.7 Vypnutí

Stiskněte vypínač (3) a vypněte výhřevnou podušku (2). Pořadí spínání je 1 - 2 - 3 - VYPNUTO ...

LED kontrolka vypínače a LED kontrolka u powerbanky (1) zhasnou po vypnutí výhřevné podušky.



UPOZORNĚNÍ

Uvědomte si prosím, že byste měli powerbanku (1) chránit před extrémním chladem (např. pod oděvem), aby byla zachována její plná výkonnost.

4.8 Doba automatického vypnutí

Tato vyhřívací poduška (2) je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 110 minut po zapnutí vyhřívací podušky zastaví. Kontrolka vypínače na vyhřívací podušce (3) a modrá LED kontrolka na powerbance zhasnou.

Stisknutím vypínače můžete vyhřívací podušku ihned zapnout. Pokud se již vyhřívací poduška nezapne, je vybitá powerbanka.

5. Čištění a údržba



POZOR

- Před čištěním vždy odpojte nejdříve powerbanku (1) od vyhřívací podušky (2). Vyměňte powerbanku z kapsy vyhřívací podušky. Jinak hrozí nebezpečí jejího poškození.



POZOR

- Powerbanka (1) nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

Pro čištění powerbanky (1) používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.



POZOR

- Respektujte, že se vyhřívací poduška (2) nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat ani žehlit. Jinak by se mohla vyhřívací poduška poškodit.

Tuto vyhřívací podušku lze prát v pračce. Zapněte suchý zip na vyhřívací podušce a vložte ji do povlaku na polštář. Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu).

Z ekologických důvodů perte vyhřívací podušku (2) spolu s jinými textiliemi.

Používejte jemný prací prostředek a dodržujte dávkování podle údajů výrobce.



POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní vyhřívací podušku (2) velmi zatěžuje.

Vyhřívací poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.

Vyhřívací podušku rozprostřete na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



POZOR

- K připevnění vyhřívací podušky (2) nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla vyhřívací poduška poškodit.
- Spojte vyhřívací podušku s powerbankou (1) teprve tehdy, když jsou vyhřívací poduška i zástrčka propojovacího kabelu (4) zcela suché. Jinak by mohlo dojít k poškození powerbanky i vyhřívací podušky.

6. Uložení

Vyhřívací podušku můžete brát všude s sebou uloženou v plátěném pytlíku. Odpojte powerbanku (1). Opatrně srolujte vyhřívací podušku (2) a powerbanku vložte samostatně do plátěného pytlíku.

Pokud nebudete vyhřívací podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uchovávat v plátěném pytlíku. Vždy odpojujte powerbanku, než vložíte srolovanou vyhřívací podušku do plátěného pytlíku. Vyhřívací podušku nikdy nepřehýbejte.



POZOR

Výhřevnou podušku (2) nechejte nejdříve vychladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládáte žádné předměty, aby se nepoškodila.



POZOR

Ukládejte powerbanku (1) na suchém, chladném a bezprašném místě bez přímého slunečního záření. Powerbanku byste měli nabíjet 1x za rok, aby byla zajištěna její kapacita.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci. Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
LED kontrolka vypínače (3) na výhřevné podušce (2) a modrá LED kontrolka na powerbance (1) nesvídí, zatímco: – je powerbanka propojena s výhřevnou poduškou a – vypínač byl stisknut.	Powerbanka je úplně vybitá. Vzhledem k výskytu závady došlo k BEZPEČNOSTNÍMU VYPNUTÍ výhřevné podušky.	Nabijte powerbanku. Nechejte výhřevnou podušku zchladnout na pokojovou teplotu a pak ji opět zapněte.
LED kontrolka vypínače (3) na výhřevné podušce (2) a modrá LED kontrolka na powerbance (1) nesvídí, zatímco: – je plně nabitá powerbanka propojena s výhřevnou poduškou a – vypínač byl stisknut.	Výhřevná poduška nebo powerbanka jsou vadné.	Zašlete výhřevnou podušku a powerbanku do servisu.

9. Technické údaje

Powerbanka:

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Skladovací teplota: -10 °C až +45 °C

Doporučená skladovací teplota: -10 °C až +25 °C

Technické údaje, viz výrobní štítek na výhřevné podušce a na powerbance.

10. Náhradní díly

V zákaznickém servisu si můžete objednat tyto náhradní díly:

- Powerbanka (č. výr. 163.296)
- Nabíjecí kabel (č. výr. 163.297)
- Prodlužovací pásek (č. výr. 163.298)

USB® je registrovaná obchodní značka společnosti USB Implementers Forum Inc.

